

TIRE-TIQUES BIOCANINA

1. DESCRIPTION

a. Utilisation

Permet de retirer les tiques (de toute taille) fixées sur la peau des Hommes et des animaux.

b. Propriétés

Ne comprime pas l'abdomen de la tique et minimise le risque de transmission de certaines maladies (piroplasmose, maladie de Lyme).

Permet un retrait simple et sans douleur.

Produit réutilisable.

2. CONSEILS D'UTILISATION

Mode d'emploi

- 1) Choisir le crochet adapté à la taille de la tique
- 2) Placer le crochet sous la tique en l'engageant par le côté
- 3) Tourner lentement le crochet (1 à 3 tours) en le soulevant légèrement

CHOISIR LE CROCHET ADAPTÉ À LA TAILLE DE LA TIQUE



Placer le crochet
sous la tique en
l'engageant par le côté



Tourner lentement
(1 à 3 tours) en **soulevant**
légèrement.

3. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer d'éther, d'alcool ou des produits chimiques pour endormir la tique.

Appliquer un antiseptique après le retrait de la tique.

Pour les enfants de moins de 8 ans, les femmes enceintes et les personnes présentant une rougeur persistante plus de 3 jours, consultez un médecin.

4. AUTRES INFORMATIONS

a. Présentation

2 crochets tire-tiques biocanina :

1 crochet de 5 cm pour les petites tiques

1 crochet de 6 cm pour les plus grandes tiques

b. Conseils Biocanina

Pour réduire le risque de morsure de tique lors d'une balade en forêt ou dans les zones de hautes herbes :

- En prévention, pensez à traiter votre animal avec un antiparasitaire externe qui agit contre les tiques
- Restez de préférence sur des sentiers balisés
- Prenez des vêtements couvrants (pantalons, manches longues, chaussures fermées)
- En rentrant de votre excursion, inspectez votre chien ainsi que toutes les parties de votre corps, pour vérifier si aucune tique n'a besoin d'être retirée avec le tire-tiques biocanina.